

Oxivir Sporicide Wipe CE

Reiniger- en desinfectant voor niet-invasieve medische hulpmiddelen

Omschrijving

Diversey Oxivir Sporicide Wipe CE is een eenstaps reinigings- en desinfectiedoekje effectief tegen *Clostridium difficile*. Gebaseerd op Diversey's gepatenteerde AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) formulering en kan worden gebruikt op niet-invasieve medische hulpmiddelen.

Eigenschappen

- Effectief tegen **C difficile** in 5 minuten
- Sporicide, Bactericide, Virusdodend en Gistdodend
- Effectieve reiniger
- Geurloos
- Het actieve ingrediënt breekt af in water en zuurstof - Er blijven geen actieve resten achter op het oppervlak
- Bevat geen chloor of ethanol

Voordelen

- Uitstekende reactie op **C difficile** uitbraak
- Brede werkzaamheid tegen alle andere soorten ziekteverwekkers biedt bescherming van de patiënt op het hoogste niveau.
- Korte contacttijden houden het oppervlak vochtig, waardoor de werkzaamheid van het desinfectiemiddel gewaarborgd blijft.
- Geschikt voor gebruik in hoge risico gebieden in de gezondheidszorg, waaronder: intensive care units (ICU), neonatale intensive care units (NICU), patiënten- en isolatiekamers.

Gebruiksaanwijzing

- Breng het product aan op het oppervlak met een doek of wegwerphanddoek.
- Veeg over het oppervlak en zorg ervoor dat het vochtig blijft gedurende de vereiste tijd bij 20°C zoals aangegeven in de onderstaande tabel.
- Spoel af om ervoor te zorgen dat er geen productresten achterblijven.

CE
0044



 **Diversey Europe
Operations B.V.**
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



© A.I.S.E

Oxivir Sporicide Wipe CE

Technische gegevens

pH-waarde (puur):	~ 3
Relatieve dichtheid (20°C):	≈ 1.03
Materiaal:	Polypropyleen doekje, 25GSM, geïmpregneerd met desinfectiemiddel op basis van Oxivir's Accelerated Hydrogen Peroxide®

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.solenis.com/>. Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheidspraktijken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet mengen met andere producten tenzij geadviseerd door Diversey. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Het product is niet bedoeld voor hergebruik. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Waarschuwing

Niet opnieuw gebruiken. Niet bedoeld voor gebruik op invasieve medische hulpmiddelen. Het product is niet bedoeld voor gebruik op de menselijke huid. Reageert met oxideerbare stoffen.

Niet mengen met andere producten. Geen warm water gebruiken. Niet gebruiken op water- of zuurgevoelige oppervlakken. Niet gebruiken op oppervlakken zoals aluminium, messing, koper, ijzer, zink, PVC en leer. Niet gebruiken op dialysatoren en dialyseslangen en kritische (chirurgische) instrumenten die weefsel binnendringen of de bloedsomloop binnendringen. Het is niet voor gebruik op semi-kritische instrumenten die in direct contact komen met intacte slijmvliezen en tot een hoog niveau gedesinfecteerd moeten worden. Trek onmiddellijk alle besmette kleding uit. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals vereist. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie.

Waarschuwing. Gevarenaanduidingen:

Veroorzaakt huid- en ernstige oogirritatie.

In geval van een ernstig incident met betrekking tot het gebruik van Oxivir Sporicide Wipe CE, dient de gebruiker dit te melden aan Diversey Europe Operations BV en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

Oxivir Sporicide Wipe CE

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen	
Oog- / gezichtsbescherming:	Geen speciale vereisten bij normaal gebruik
Handbescherming:	Herhaald of langdurig contact: Chemicaliënbestendige beschermende handschoenen (EN 374). Controleer de instructies van de handschoenenleverancier over permeabiliteit en doorbraaktijd. Houd rekening met specifieke lokale gebruiksomstandigheden, zoals risico op spatten, snijwonden, contacttijd en temperatuur. Aanbevolen handschoenen voor langdurig contact: Materiaal: butylrubber. Doordringingstijd: ≥ 480 min. Materiaaldikte: $\geq 0,7$ mm. Aanbevolen handschoenen voor bescherming tegen spatten: Materiaal: nitrilrubber. Doordringingstijd: ≥ 30 min. Materiaaldikte: $\geq 0,4$ mm. In overleg met de leverancier van beschermende handschoenen kan een ander type worden gekozen dat een vergelijkbare bescherming biedt.
Lichaamsbescherming	Geen speciale vereisten bij normaal gebruik.
Bescherming van de luchtwegen:	Geen speciale vereisten bij normaal gebruik.

Instructies voor verwijdering

Restafval / ongebruikte producten: De geconcentreerde inhoud of verontreinigde verpakking moet worden afgevoerd door een erkend afvalverwerker of volgens de locatievergunning. Het lozen van afval in de riolering wordt afgeraden. Het gereinigde verpakkingsmateriaal is geschikt voor energieteerugwinning of recycling in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. **Europese afvalcatalogus:** 20 01 29* - wasmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten. Lege verpakking **Aanbeveling:** Verwijderen volgens nationale of plaatselijke voorschriften. **Geschikte reinigingsmiddelen:** Water, eventueel met reinigingsmiddel.

Productcompatibiliteit

Belangrijk: Oxivir Sporicide Wipe CE is geschikt voor gebruik op oppervlakken zoals roestvrij staal, plastic, rubber en vinyl. Ander gebruik dan aangegeven wordt niet aanbevolen.

Microbiologische gegevens

Claim	EN test	Conditions	Contact time
Bactericidal	EN13727 & EN16615	Dirty	1 min
Yeasticidal	EN13624 & EN16615	Dirty	1 min
Virucidal	EN14476	Dirty	1 min
Fungicidal	EN13624 & EN16615	Dirty	7 min
Mycobactericidal	EN14348	Dirty	10 min
Sporicidal against C. difficile	EN17126	Dirty	5 min

Milieu-informatie

De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar en voldoen aan de vereisten van de EU Detergentenverordening, EG 648/2004.

Oxivir Sporicide Wipe CE

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
100959787	DI OXIVIR SPORICIDE WIPECE 12X80PC W806	Wipes

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.15/04/2026 nl-NL (K00405)